

DR. SEILER



UND KOLLEGEN

**Praxisklinik für Oralchirurgie
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Zahnärztliche Implantologie
und Implantatplanung**

Echterdinger Straße 7 · 70794 Filderstadt
Telefon: 0711 70094-70 / Fax -71
E-mail: info@implantologie-stuttgart.de

Medizinzentrum im Nanz-Center (3. OG)
Kolbstraße 2 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 931997-0 / Fax -33

Anleitung Ez3D2009 Viewer Installation (Kurzversion)

1. CD / DVD ins CD/DVD Rom Laufwerk einlegen
2. Arbeitsplatz / Computer starten -> CD/DVD Rom Laufwerk anklicken.
3. Auf der CD / DVD befindet sich eine „Launcher.exe“ die doppelt anklicken
4. Die Installationsroutine startet, man klickt nur auf Next oder Weiter, das Programm (Ez3D2009 Viewer) installiert sich
5. Nach der Installation fängt der Viewer an, die Datensätze reinzuladen.

Eine ausführliche Anleitung kann im Internet unter www.implantologie-stuttgart.de (Bereich: Überweiser) herunterladen werden.

Bei Installationsproblemen stehen wir ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.